


**Estas mascarillas higiénicas no son un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS), y no están diseñadas para sustituir a estos.**

## Mascarillas higiénicas reutilizables

### Instrucciones de uso:

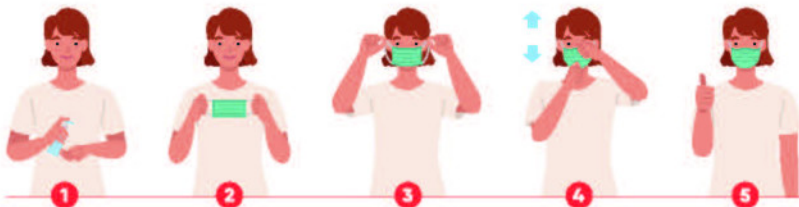

**1.** Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

**2-3.** Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla.

**4.** Asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

**5.** Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos de nuevo. No dejar en otras superficies.

**6.** Quítese la mascarilla por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); tras el límite de usos y lavados, deséchela en un recipiente cerrado y lávese las manos.

**Composición:** tejido repelente de líquidos 100% Lenzing Lyocell – TENCEL de doble capa.

**Resultados:** Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%):  $98,91 \pm 0,71$ ; Respirabilidad – Presión diferencial ( $\text{Pa}/\text{cm}^2$ ):  $28 \pm 3$ . Número de ensayo: 2020TM0394. Laboratorio: Aitex Textile Research Institute (Asociación de Investigación de la Industria Textil).

## Recomendaciones de lavado:

### • Paso 1:

Dejar la mascarilla a remojo en agua templada durante aproximadamente 5 minutos.

### • Paso 2:

Lavar la mascarilla con jabón y aclarar con una temperatura de  $40^\circ$

### • Paso 3:

Dejar secar la mascarilla y, si es posible, planchar a temperatura alta (aprox.  $150^\circ\text{C}$ )

Venta en pack indivisible  
Confeccionadas en Torrelavega, Cantabria, España.

SOEMCA EMPLEO S.L. – B39272513 –  
Bº SIERRAPANDO, 508 – TORRELAVEGA – 39300  
CANTABRIA

**amica.es**

### Mascarillas higiénicas reutilizables

**EL MÁXIMO NÚMERO DE LAVADOS SERÁ DE 5 Y UNA VEZ USADA ESTA SEXTA VEZ HABRÍA QUE SUSTITUIRLA EN TODOS LOS CASOS.**

**Recordarle que las mascarillas deben de ser de uso personal e intransferible. No se debe intercambiar la mascarilla una vez usada con otra persona.**